

Simpler und  
effektiver  
**SCHUTZ** gegen  
Nadelstichverletzungen



CONTA-GUARD™

# SCHÜTZEN Sie sich gegen Nadelstich- verletzungen

CONTA-GUARD™ schützt Sie vor Unfällen durch Nadelstiche während des gesamten Arbeitsverfahrens – vom Vorbereiten bis zum Entsorgen der Nadel.

Die laminierte CONTA-GUARD™ Einwegfolie versiegelt die rückwärtige Nadelspitze. Sobald die kontaminierte Nadel sicher verschlossen ist, ist jedes weitere Handhaben absolut sicher.

Der CONTA-GUARD™ Ständer erlaubt sicheres, einhändiges recapping – auch wenn wiederholte Injektionen notwendig sind.

Das System ist einfach zu bedienen und in die täglichen Routine zu integrieren.

Es passt für alle standard Dental-spritzen und -Kanülen.





1

Entfernen Sie das perforierte Feld (Ausziehöffnung) an der Seite/Boden der Schachtel.



2

Ziehen Sie die Schutzfolie von der Klebseite ab und drücken Sie die Nadelkappe von der Klebseite her durch das Loch.



3

Platzieren Sie die vorbereitete Spritze im CONTA-GUARD™ Ständer. Drücken Sie leicht auf die Flügel des Ständers. Dabei wird die Nadelkappe im Ständer festgehalten und die Injektionsnadel ist nun ohne Kappe.



4

Die Nadelkappe mit CONTA-GUARD™ verbleibt während der Injektion im CONTA-GUARD™ Ständer.



5

Nach der Injektion drücken Sie die benutzte Nadel in die im CONTA-GUARD™ Ständer befindliche Kappe – achten Sie darauf nicht die Nadelkappe mit der Nadel zu perforieren.



6

Nehmen Sie die Spritze aus dem Cona-guard Ständer ohne die Metallflügel seitlich zu drücken und schrauben die Nadel ab.



7

Falten Sie Cona Guard fest um die Nadelkappe und die offene Nadel auf der Kanülenseite.



8

Die Nadel ist nun versiegelt und Sie sind vollständig gegen unbeabsichtigte Stichverletzungen geschützt.

Sehen Sie animierte  
Step by Step Anweisung



# CONTA-GUARD™

bietet effektiven Schutz gegen Nadelstichverletzungen. Schützt im ganzen Verlauf von der Injektion bis zur Entsorgung der benutzten Nadel.

CONTA-GUARD™

Laminierte Einwegfolien,  
Box mit 200 Stück, RØNVIG Bestellnummer 2200  
Recapping Ständer, RØNVIG Bestellnummer 2222

Design und Produktion in Dänemark von



**RØNVIG** Dental Mfg. A/S

Gl. Vejlevej 59 · DK-8721 Daugaard · Tel.: +45 70 23 34 11

Fax: +45 76 74 07 98 · E-mail: [export@ronvig.com](mailto:export@ronvig.com) · [www.ronvig.com](http://www.ronvig.com)