

DENTO-PREP™ DUST-CABINET 12V

BRUGERVEJLEDNING

REF 1905 | da

Anvendelsesformål:

DUST-CABINET er beregnet til pulverblæsning med DENTO-PREP™.

Klargøring:

Sæt netledningen i og DUST-CABINET er klar til brug.

Rude i DUST-CABINET kan fjernes ved at skubbe/skyde det opad.

Sikkerhedsforanstaltninger:



- ⚠ Anvend kun den strømforsyning der følger med enheden.
- ⚠ Træk stømtikket ud under rengøring og filterskift.
- ⚠ Handsker bør anvendes ved brug af DUST-CABINET.

Vedligeholdelse:

Regelmæssig rengøring af DUST-CABINET anbefales: Fjern vinduet og støvsug kabinettet.

Filterskift:

DUST-CABINET er udstyret med et støvfilter, som beskytter det indbyggede elektroniske sugesystem imod pulveret. Tjek filteret regelmæssigt. Hvis filteret er beskadiget eller slidt udskiftes filteret ved at følge illustration 1-4.

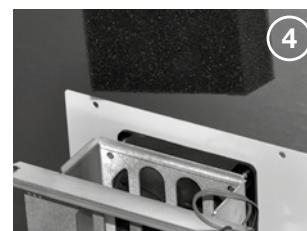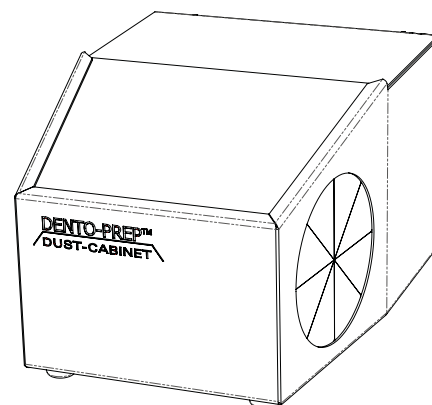

Tekniske data:

Dimensioner:	H 180 x B 222 x D 298
Vægt:	3776 gram
Strøm:	12 VDC / 1A
Lampe:	LED HF210034, 12 VDC, 3,9W, 4000K, 900 lumen
Kabinet materiale:	Pulver lakeret stål
Rude:	Plexiglas

Bortskaffelse:

DUST-CABINET bortskaffes hvis produktet er beskadiget eller har synlige tegn på slid.

Efter sidste brug skal DUST-CABINET bortskaffes i en separat indsamling til elektronisk udstyr i henhold til WEEE-direktivet 2012/19/EU.

Garanti: 2 år



RØNVIG Dental Mfg. A/S

Gl. Vejlevej 59 • DK-8721 Daugaard • Danmark

Tel.: +45 70 23 34 11 • Fax: +45 76 74 07 98 • E-mail: export@ronvig.com • www.ronvig.com

