

WASH TRAY™ Anleitung	
REF 30005 1/1 Tray (275 x 180mm) für max. 20 Instrumente REF 30006 ½ Tray (131 x 180mm) für max 9 Instrumente REF 30007 ¼ Tray (73 x 180mm) für max 5 Instrumente	
Verwendungszweck	Zur Fixierung und Organisation von Dentalinstrumenten während der Thermodesinfektion, Sterilisation, Lagerung und Behandlung am Behandlungsstuhl
Verfügbare Ersatzteile	REF 29995 Silikonstreifen-Set für 1/1 Tray 30005 REF 29997 Silikonstreifen-Set für ½ Tray 30006 REF 29999 Silikonstreifen-Set für ¼ Tray 30007
Erste Benutzung	WASH TRAY™ wird unsteril geliefert und muss vor dem ersten Gebrauch gereinigt und sterilisiert werden.
Einschränkungen bei der Wiederaufbereitung	Wiederholte Wiederaufbereitungen hat nur minimale Auswirkungen auf das WASH TRAY™
Eindämmung und Transport	Keine besonderen Anforderungen
Vorbereitung zur Reinigung	Keine besonderen Anforderungen
Reinigung: Machinell	Reinigen Sie in einem Dental-Thermodesinfektor mit einem Universalwaschprogramm bei 90 °C und 5 Minuten. Trocknung: Keine besonderen Anforderungen. Es können handelsübliche zahnärztliche Thermodesinfektionsmittel verwendet werden, wie zum Beispiel: a) Reinigungsmittel, neodisher MediClean forte von Dr. Weigert, 30 ml/Zyklus b) Neutralisator, Neodisher Z von Dr. Weigert, 9 ml/Zyklus c) Klarspüler, neodisher MediKlar von Dr. Weigert, 2,5 ml/Zyklus d) Spülmaschinensalz, grobes Neophos-Salz
Reinigung: Manuell	Nicht anwendbar
Sterilisation	In einem Dampfautoklav (ISO 13060 Klasse B) bei Standardprogramm 134 °C, 2 bar, 5,5 Min., Betriebszeit: 25 Min. sterilisieren, 25 Min. trocknen lassen.
Lagerung	An einem trockenen Ort aufbewahren, geschützt vor Kontamination.
Inspektion und Funktionsprüfung	Keine besonderen Anforderungen.
Weitere Anweisungen	Beim Reinigen und Sterilisieren mehrerer Instrumente in einem automatischen Reinigungs- und Sterilisationszyklus, bitte stellen Sie sicher, dass die maximale Beladung des Thermodesinfektors und Sterilisators nicht überschritten wird.
Entsorgung	Entsorgen Sie das WASH TRAY™, wenn es beschädigt ist oder sichtbare Gebrauchsspuren aufweist. Entsorgen Sie das WASH-TRAY™ nach dem letzten Gebrauch in sauberem Zustand in einem Recyclingbehälter.

File: IFU_WASH TRAY_DE_version 02_2023.11


RØNVIG Dental Mfg. A/S

Gl. Vejlevej 59 • DK-8721 Daugaard • Denmark
Tel.: +45 70 23 34 11 • Fax: +45 76 74 07 98 • E-mail: contact@ronvig.com www.ronvig.com

